

ANLEITUNG FÜR DEN PCR-TEST „ALLES GURGELT“

1. Öffne bitte folgenden **Link** auf deinem Smartphone/Tablet bzw. PC: lead-horizon.org/public
2. Folge den Anweisungen in der WEBAPP!
3. Klicke auf den Button "**Registrieren oder als Gast fortfahren**":

Schön, dass du da bist.

Herzlich willkommen bei LEAD Horizon.
Danke, dass du dich testen lässt.

Melde dich an oder registriere dich, wenn du zum ersten Mal hier bist. Du kannst auch als Gast fortfahren.

Wenn du dich registrierst, kannst du künftige Tests schneller durchführen.
Du musst deine Daten dann nicht erneut eingeben.

Registrieren oder als Gast fortfahren

Zur Anmeldung

made by LEAD HORIZON

Sprache Deutsch

4. Gib deine **Probennummer** ein (händisch oder mit der Kamera scannen)! Du findest sie in dem **Testkitpäckchen** auf der **ersten Seite der Anleitung**.

Wie lautet deine Probennummer?

Du findest die Probennummer auf dem **Probenröhrchen** ①. Du kannst den Barcode mit deiner Kamera scannen, indem du auf die türkise Schaltfläche tippst. Natürlich kannst du die Probennummer auch selbst eingeben.

Bitte überprüfe, ob die Probennummer auf dem Probenröhrchen mit jener auf der **Gebrauchsanweisung** ④ übereinstimmt. Wenn nicht, dann melde dich bitte bei unserem **Support**.

Deine Probennummer

LHIA00000108

5. **Datenschutzerklärung akzeptieren** (unter der Probennummer)

Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) zur Teilnahme am freiwilligen Screeningprogramm "Alles Gurgelt!" zur Kenntnis genommen.

Wenn ich außerhalb von Wien teilnehme, bestätige ich, dass ich mindestens 14 Jahre alt bin und willige in die Verarbeitung der von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung eines COVID-19 Tests ein. Die Verarbeitung erfolgt in der Verantwortung der LEAD Horizon GmbH und umfasst auch die Befundübermittlung durch LEAD Horizon sowie die Übermittlung der Daten an das

6. Klicke auf den Button "**Aktivieren und fortfahren**!"

Screeningprogramme (§ 5b Epidemiegesetz 1950). Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) zur Kenntnis genommen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, wodurch die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs nicht berührt wird. Ein entsprechender Widerruf ist zu richten an: datenschutz@lead-horizon.com.

Aktivieren und fortfahren

7. Deine Schul-E-Mail Adresse eingeben!

8a. Klicke anschließend auf den Button "Link senden":

Bestätige deine E-Mail-Adresse.

Bitte gib deine E-Mail-Adresse ein. Wir senden dir dann eine Mail mit einem Bestätigungslink.

Deine E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Bei E-Mail-Adressen von GMX, t-online oder web.de kann es zu Verzögerungen kommen. Bitte überprüfe auch deinen Spam-Ordner.

Verifizierungsmail überspringen

Link senden

This screenshot shows a form titled 'Bestätige deine E-Mail-Adresse'. It asks the user to enter their email address. Below the input field, there is a checkbox for 'Verifizierungsmail überspringen'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Link senden'. Red circles with numbers 7 and 8 highlight the input field and the 'Link senden' button respectively.

Du solltest nun in deinem Mailpostfach ein E-Mail mit einem Bestätigungslink erhalten.

Öffne das Mail und klicke auf den Button "Zum Test"!

8b. Zurück im Browser klicke auf den Button "Test beginnen".

Die Bestätigung war erfolgreich.

Vielen Dank für die Bestätigung. Wir sind jetzt bereit. Du auch?

Test beginnen

This screenshot shows a confirmation screen titled 'Die Bestätigung war erfolgreich'. It contains a message of thanks and a blue button labeled 'Test beginnen'. A red circle with the number 8 highlights the 'Test beginnen' button.

9. Damit du dich nicht manuell der Schule/Klasse zuordnen musst, klicke auf das "+"-Symbol.

Deine persönlichen Angaben.

Bitte gib einige Daten zu deiner Person ein. Ohne sie können wir leider kein Ergebnis liefern.

Klicke hier, wenn du über eine Schule getestet wirst.

This screenshot shows a form titled 'Deine persönlichen Angaben'. It asks for personal data. At the bottom, there is a button with a plus sign and the text 'Klicke hier, wenn du über eine Schule getestet wirst.' A red circle with the number 9 highlights this button.

10. Lege den QR-Code bereit, den du erhalten hast, und klicke dann auf den Button "Ja, ich habe einen QR-Code".

Klicke hier, wenn du über eine Schule getestet wirst.

Hast du bereits einen QR Code von der Schule erhalten? Wenn ja, bitte klicke den grünen Button unten. Ansonsten klicke den weißen Button und wähle deine Schule manuell aus.

Ja, ich habe einen QR Code

Nein, ich will meine Schule auswählen

This screenshot shows a screen with two buttons. The top button is green and says 'Ja, ich habe einen QR Code'. The bottom button is white and says 'Nein, ich will meine Schule auswählen'. A red circle with the number 10 highlights the green button.

11. **Scanne den QR-Code** mit deinem Smartphone oder gib die Nummer, die unter deinem Namen auf dem Papier-QR-Code steht, händisch ein.

Klicke hier, wenn du über eine Schule getestet wirst.

Dein QR Code

ABCD-EFGH-IJKL-MNC

Du kannst entweder den Text unter deinem QR Code eingeben oder den Button rechts neben dem Eingabefeld klicken um deinen QR zu scannen.

This screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a text prompt: "Klicke hier, wenn du über eine Schule getestet wirst." Below this is a text input field containing the alphanumeric string "ABCD-EFGH-IJKL-MNC". To the right of the input field is a small blue square button with a white QR code icon. A red box highlights the input field and the button, with a red circle containing the number "11" next to it. Below the input field, there is explanatory text: "Du kannst entweder den Text unter deinem QR Code eingeben oder den Button rechts neben dem Eingabefeld klicken um deinen QR zu scannen."

12. Beantworte die folgende Frage wahrheitsgetreu!

13. Klicke anschließend unten auf den Button "Fortfahren":

Wurdest du in den letzten zwei Monaten positiv auf das Coronavirus getestet?

Eine kurz zurückliegende Infektion kann das Testergebnis beeinflussen. Daher müssen wir nachfragen.

Nein.

Ja, es wurde eine Infektion nachgewiesen.

Fortfahren

This screenshot shows a mobile application interface with a question: "Wurdest du in den letzten zwei Monaten positiv auf das Coronavirus getestet?". Below the question is a short explanatory text: "Eine kurz zurückliegende Infektion kann das Testergebnis beeinflussen. Daher müssen wir nachfragen." There are two radio button options: "Nein." and "Ja, es wurde eine Infektion nachgewiesen." At the bottom of the screen is a large blue button labeled "Fortfahren". Red boxes highlight the radio button options and the "Fortfahren" button, with red circles containing the numbers "12" and "13" respectively.

14. **Erlaube** bitte der WebApp den **Zugriff auf deine Kamera**, um deine Identität festzustellen

15. Klicke auf den Button "**Authentifizieren**" und halte anschließend die **Rückseite deiner E-Card** in die Kamera

Bitte weise dich aus.

Damit du dein Testergebnis offiziell vorweisen kannst, müssen wir sichergehen, dass auch wirklich du diesen Test machst. Daher bitten wir dich gleich darum, deinen Ausweis (Reisepass oder Personalausweis) oder deine e-card vor die Kamera zu halten.

Auch später während des Tests nehmen wir einige Fotos von dir auf.

Bitte erlaube den Kamerazugriff!

Authentifizieren

Weiter ohne Identitätsnachweis

Ohne Identitätsausweis liefern wir dir zwar ein Ergebnis, können aber leider weder Zertifikat noch medizinischen Befund als Eintrittstest ausstellen.

This screenshot shows a mobile application interface with the heading "Bitte weise dich aus." followed by a paragraph of text explaining the need for identification. Below this is another paragraph: "Auch später während des Tests nehmen wir einige Fotos von dir auf." There are three buttons: "Bitte erlaube den Kamerazugriff!" (highlighted with a red dashed box and a red circle with "14"), "Authentifizieren" (highlighted with a red solid box and a red circle with "15"), and "Weiter ohne Identitätsnachweis". At the bottom, there is a small disclaimer: "Ohne Identitätsausweis liefern wir dir zwar ein Ergebnis, können aber leider weder Zertifikat noch medizinischen Befund als Eintrittstest ausstellen."

Wenn du auf „**Weiter ohne Identitätsnachweis**“ gehst, erhältst du nur den medizinischen Befund.

16. Lies dir die Anleitung gut durch und starte den Test, indem du auf "Timer starten" klickst.

Jetzt wird getestet!

Sobald du auf „Timer starten“ klickst, startet der Timer. Lies dir deshalb bitte die Anweisungen genau durch.

Folgende Schritte musst du durchführen:

- Nimm die **Salzlösung** (2) in den Mund, klicke „Timer starten“ und gurgle bzw. spüle, solange der Countdown läuft.
- Spucke die Salzlösung mithilfe des **Transferröhrchens** (3) in das zuvor aufgeschraubte **Probenröhrchen** (1) und verschließe dieses wieder mit der roten Kappe.

Achtung: Führst du den Test ohne Identitätsnachweis vor der Kamera und Authentifizierung mit einem Ausweis durch, kann dir kein medizinischer Befund und kein Zertifikat ausgestellt werden. Du erhältst dann nur ein Ergebnis, das du aber nicht als Eintrittstest benutzen kannst. [Möchtest du dich doch authentifizieren?](#)

Timer starten

made by LEAD HORIZON Sprache Deutsch

Nach dem Gurgeln drückst du „Fortfahren“!

17.

Start Person Identitätsnachweis Testprozess Abschließen

Nun wird eingepackt.

Du hast es fast geschafft! Hier sind die letzten Schritte:

- Gib nun zwei Dinge in den **Schutzbeutel** (5): das verschlossene **Probenröhrchen** (1) und den **Zellstoff** (6).
- Behalte dir die **Gebrauchsanweisung** (4), auf dem die Probennummer steht.

Gib die Gebrauchsanweisung nicht in den Schutzbeutel und wirf sie nicht weg!

- Verschließe den **Schutzbeutel** (5) und gib ihn in die Testbox zurück.
- Das **Transferröhrchen** (3) und die Verpackung der **Salzlösung** (2) kannst du nun entsorgen.

Fortfahren

Fortfahren

made by LEAD HORIZON

18.

Jetzt geht's zur Auswertung!

Danke, dass du unseren Test gemacht hast!

Du kannst deinen Test nun während der Öffnungszeiten zur nächsten **teilnehmenden REWE-Filiale** bringen. Wirf die Testbox gut verschlossen in die vorgesehene Abgabebox.

Hier werden die Testboxen angenommen:

- BILLA
- BILLA PLUS
- BIPA
- PENNY
- BP Tankstellenshop MERKUR Inside (auch sonntags)
- Jet Tankstelle: BILLA stop & shop (auch sonntags)
- Shell Tankstelle: BILLA Unterwegs (auch sonntags)

Behalte unbedingt die Gebrauchsanweisung mit der Probennummer! Du brauchst sie zum Abrufen des Testergebnisses!

Test abschließen

19. Wenn du den Test wirklich abgeschlossen hast, bekommst du auf deine E-Mail-Adresse folgende Nachricht:

Danke fürs Mitmachen!

Wenn wir uns regelmäßig testen lassen, können wir die Covid-19-Pandemie gemeinsam bekämpfen. Danke, dass du deinen Teil dazu beiträgst.

Wenn dein Testergebnis abrufbar ist, senden wir dir eine E-Mail. Folge dann einfach dem Link und gib deine Probennummer ein.

Alternativ findest du das Testergebnis auch in deinem Profil. Für den Download des medizinischen Befundes bekommst du eine E-Mail des Partnerlabors.

Ein kleiner Tipp: Wenn du deinen Test vor 9 Uhr oder vor 14 Uhr in eine Abgabebox wirfst, bekommst du in der Regel innerhalb von 24 Stunden dein Testergebnis.

Bewahre deine Probennummer gut auf!

Bis bald und bleib gesund!